

Lagerungskissen

Für die individuelle Positionierung pflegebedürftiger Menschen



Luttermann 
■ Dienstleister im Gesundheitswesen

Ein Unternehmen der  AXIUM Gruppe

Lagerungsmöglichkeiten für pflegebedürftige Menschen

Inhalt

Inhalt/Vorwort	2
Kopf	3 - 4
Oberkörper	5 - 6
Arme	6 - 7
Oberschenkel	8
Knie	9
Unterschenkel	10 - 11
Fuß	12 - 13
Rückenlage	14
Seitenlage 30°	15
Seitenlage 135°	16
Produktübersicht	17 - 18
Bezüge/Pflege	19

Als pflegender Angehöriger bzw. Pflegekraft steht man im Alltag immer wieder vor der Herausforderung: Wie erreiche ich die bestmögliche Versorgung für den Pflegebedürftigen?

Die Lagerung nimmt hier eine zentrale Rolle ein. Neben dem Wohlbefinden für den Patienten dient die Lagerung sowohl der Vorbeugung von Folgeerkrankungen als auch der Unterstützung therapeutischer Maßnahmen.

Mit einer durchdachten Lagerung können Komplikationen wie die Entstehung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) vermieden werden. Gelenkversteifungen (Kontrakturen, Spitzfuß) und Spastiken können reduziert werden.

Darüber hinaus fördert eine individuell angepasste Lagerung aber auch die Eigenbewegung, unterstützt die Körperwahrnehmung (z.B. bei Schlaganfallpatienten) und erleichtert die Atmung.

Die Lagerungsintervalle sollten, individuell auf den Betroffenen abgestimmt, zwischen zwei und vier Stunden erfolgen.

Trotz Einsatz einer Antidekubitusmatratze bleibt die regelmäßige Lagerung ein wichtiger pflegerischer Bestandteil zur Vermeidung eines Dekubitus.

Diese Broschüre für spezielle Lagerungshilfsmittel soll Ihnen helfen, sich einen Überblick über die Möglichkeiten der individuellen Lagerungsmöglichkeiten zu machen und Sie bei der Auswahl des richtigen Hilfsmittels unterstützen.

Die hier aufgeführten Produkte haben alle eine Hilfsmittelnummer und sind somit bei vorliegender Indikation verordnungsfähig.

Lagerungsmöglichkeiten für den Kopf

Ringkissen

Der Kopf ist zu jeder Zeit sicher positioniert. Die Pflegeperson hat somit beide Hände frei zur Bewegungsförderung des Betroffenen.



Rückenlagerung

30° Seitenlagerung



135° Seitenlagerung



■ Größe M: 130 x 21 cm, Art.-Nr.: P43777

■ Größe S: 106 x 15 cm, Art.-Nr.: P43776

Zylinderkissen

Das Zylinderkissen stabilisiert in Seitenlagerung die physiologische Stellung der Wirbelsäule.



■ Größe M: 17 x 70 cm, Art.-Nr.: P43779

■ Größe M: (2x) 17 x 31 cm, Art.-Nr.: P43780

■ Größe S: 14 x 45 cm, Art.-Nr.: P43778

Universalkissen

Das Universalkissen stabilisiert die Lagerung des Kopfes und verhindert z.B. die Überstreckung.



■ Größe M: 60 x 40 cm, Art.-Nr.: P43772

■ Größe L: 70 x 50 cm, Art.-Nr.: P43773

■ Größe M: (2x) 30 x 40 cm, Art.-Nr.: P43774

■ Größe S: 30 x 45 cm, Art.-Nr.: P43771

Lagerungsmöglichkeiten für den Kopf

Semi-Fowler-Kissen

Dieses Kissen verhindert wirksam die Überstreckung des Kopfes und verbessert die Eigenwahrnehmung des zu Pflegenden.



■ Größe M: 65 x 50 x 15 cm, Art.-Nr.: P43798

■ Größe S: 50 x 35 x 13 cm, Art.-Nr.: P43797

Halbmondkissen

Das Halbmondkissen unterstützt in Seitlagerung die Positionierung des Kopfes und stabilisiert den Rücken. In Rückenlage werden zusätzlich Schulter und Nacken entlastet.



Rückenlagerung



30° Seitenlagerung



■ Größe M: 180 x 31 cm, Art.-Nr.: P43796

■ Größe S: 142 x 25 cm, Art.-Nr.: P43795

Lagerungsmöglichkeiten für den Oberkörper

Halbmondkissen

Das Halbmondkissen dient zur Nestlagerung. Die Eigenwahrnehmung wird verbessert. Schultern und Kopf werden mit nur einem Element positioniert.



Rückenlagerung



30° Seitenlagerung

Eine Entlagerung des zu Pflegenden wird wirksam verhindert.



■ Größe M: 180 x 31 cm, Art.-Nr.: P43796

■ Größe S: 142 x 25 cm, Art.-Nr.: P43795

Zylinderkissen

Das Zylinderkissen wird zur Abstützung des Oberkörpers bei kleineren Personen empfohlen.



■ Größe M: 17 x 70 cm, Art.-Nr.: P43779

■ Größe M: (2x) 17 x 31 cm, Art.-Nr.: P43780

■ Größe S: 14 x 45 cm, Art.-Nr.: P43778

Universalkissen

Mit dem Universalkissen kann in Seitenlage Schulter und Arm in physiologischer Position gelagert werden. Es unterstützt die Körperwahrnehmung.



135° Seitenlagerung



■ Größe M: 60 x 40 cm, Art.-Nr.: P43772

■ Größe L: 70 x 50 cm, Art.-Nr.: P43773

■ Größe M: (2x) 30 x 40 cm, Art.-Nr.: P43774

■ Größe S: 30 x 45 cm, Art.-Nr.: P43771

Lagerungsmöglichkeiten für den Oberkörper und die Arme

Deltakissen

Dieses Kissen stützt den Oberkörper und kann sowohl in Seitenlagerung als auch in 135°- Lagerung eingesetzt werden und verhindert das Entlagern.



135° Seitenlagerung



90° Seitenlagerung mit zusätzlicher Abstützung durch Universalkissen zur Positionierung des Unterarms.



■ Größe M: 41 x 60 cm, Art.-Nr.: P43794

■ Größe S: 25 x 42 cm, Art.-Nr.: P43793

Seitenlagerungskissen

Dieses Kissen ermöglicht die 30°- und 135°-Seitenlagerung über die gesamte Körperlänge mit nur einem Hilfsmittel und erhöht die Körperwahrnehmung.



135° Seitenlagerung



30° Seitenlagerung



■ Größe M: 180 x 31 cm, Art.-Nr.: P43800

■ Größe S: 142 x 26 cm, Art.-Nr.: P43799

Hemi-Armkissen

Dieses Kissen bietet eine Variante zur individuellen Positionierung des Armes, die einen Therapeutisch ersetzen kann und das Dekubitusrisiko an den Ellenbogen verringert.



■ Größe M: 58 x 36, 48 x 16 ø cm Art.-Nr.: P43786


■ Größe S: 45 x 30, 30 x 13 ø cm Art.-Nr.: P43785

Lagerungsmöglichkeiten für die Arme

Abduktionskissen

Bei einem gelähmten Arm ist in der Positionierung auch die natürliche Beugung zu berücksichtigen.

Außerdem unterstützt das Abduktionskissen die Ödemrückbildung und vermeidet Gelenkversteifungen von Hand und Unterarm.

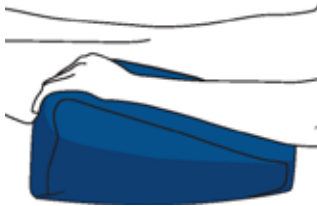

ca. 30° Beugung



■ Größe M: 30 x 21 x 15 cm, Art.-Nr.: P43807

■ Größe S: 23 x 18 x 12 cm, Art.-Nr.: P43806

Zylinderkissen S, Universalkissen S

Beide Kissen können sehr gut bei der klassischen Handlagerung eingesetzt werden.



Zylinderkissen S



Universalkissen S



■ Größe S: 45 x 14 cm, Best.-Nr.: NEG 0884



■ Größe S: 45 x 30 cm, Best.-Nr.: NEG 0881

Universalkissen

Das Universalkissen kann bei Seitenlagerung auch in Verbindung mit dem Zylinderkissen für die Beine genutzt werden.



130° Seitenlagerung großem Universalkissen



30° Lagerung mit kleinem Universalkissen



■ Größe M: 60 x 40 cm, Art.-Nr.: P43772

■ Größe L: 70 x 50 cm, Art.-Nr.: P43773

■ Größe M: (2x) 30 x 40 cm, Art.-Nr.: P43774

■ Größe S: 30 x 45 cm, Art.-Nr.: P43771

Lagerungsmöglichkeiten für die Beine im Oberschenkelbereich

Abduktionskissen

Bei einigen Positionierungen ist eine Abduktion im Kniebereich notwendig.
Bei Betroffenen mit Spastiken ist dies eine wirksame Maßnahme.



■ Größe M: 30 x 21 x 15 cm, Art.-Nr.: P43807

■ Größe S: 23 x 18 x 12 cm, Art.-Nr.: P43806

Semi-Fowler-Kissen

Seine einzigartige Form mit eingearbeitetem Abduktionselement sichert eine hüftbreite Positionierung der Beine. Die Unterschenkel sind optimal geführt. Die Fersen liegen frei.




■ Größe M: 65 x 50 x 15 cm, Art.-Nr.: P43798

■ Größe S: 50 x 35 x 13 cm, Art.-Nr.: P43797

Kombinationen

Sie sehen hier eine Kombination aus Universal- und Abduktionskissen.

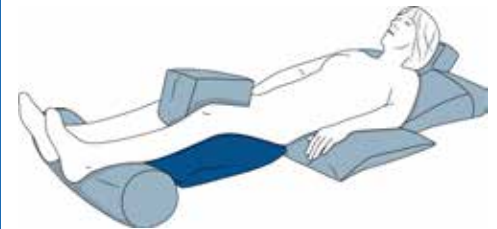

Universalkissen unter den Waden



Im Vergleich: Das Semi-Fowler-Kissen

Lagerungsmöglichkeiten für die Beine im Kniebereich

Deltakissen

Durch die Dreiecksform besonders geeignet bei Knie- und Hüftbeugekontrakturen. Ein Universalkissen kann bei sehr großen Personen zusätzlich untergelegt werden.



- Größe M: 41 x 60 cm, Art.-Nr.: P43794
- Größe S: 25 x 42 cm, Art.-Nr.: P43793

Semi-Fowler-Kissen


Das Kissen sorgt für eine hüftbreite Positionierung des Betroffenen. Der Abduktionskeil stellt sicher, dass sich an den Gelenkfortsätzen des Knies keine Druckstellen bilden.



- Größe M: 65 x 50 x 15 cm, Art.-Nr.: P43798
- Größe S: 50 x 35 x 13 cm, Art.-Nr.: P43797

Zylinderkissen

Das Zylinderkissen kann zur entlastenden Lagerung der Knie genutzt werden.

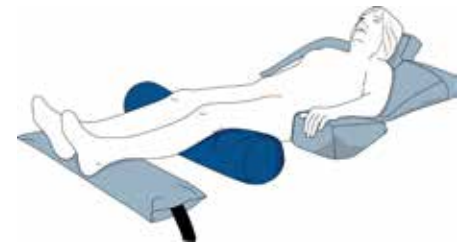

- Größe M: 17 x 70 cm, Art.-Nr.: P43779
- Größe M: (2x) 17 x 31 cm, Art.-Nr.: P43780
- Größe S: 14 x 45 cm, Art.-Nr.: P43778

Lagerungsmöglichkeiten für die Beine im Unterschenkelbereich

Zylinderkissen Größe XS & Deltakissen

Durch die Kombination eines Deltakissens mit einem Zylinderkissen Größe XS wird die Positionierung der Waden bei gleichzeitiger Druckentlastung der Fersen ermöglicht.



In Rückenlage



■ Größe S: 45 x 14 cm, Art.-Nr.: P43778



■ Größe M: 41 x 60 cm, Art.-Nr.: P43794


■ Größe S: 25 x 42 cm, Art.-Nr.: P43793

Zylinderkissen, Universalkissen, Seitenlagerungskissen bei 135° Seitenlagerung

Bei der Positionierung wird das oben liegende Bein auf einem Zylinder- oder Universalkissen bzw. Seitenlagerungskissen positioniert.



Zylinderkissen

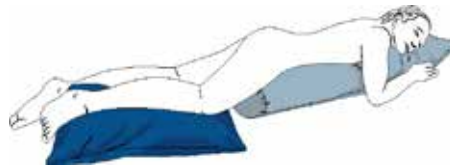

Universalkissen



Seitenlagerungskissen

Die Gelenkfortsätze sind geschützt, ohne dass es zu unangenehmen Zugkräften im Hüftgelenk kommt



■ Größe M: 17 x 70 cm, Art.-Nr.: P43779

■ Größe M: (2x) 17 x 31 cm, Art.-Nr.: P43780

■ Größe S: 14 x 45 cm, Art.-Nr.: P43778



■ Größe M: 60 x 40 cm, Art.-Nr.: P43772

■ Größe L: 70 x 50 cm, Art.-Nr.: P43773

■ Größe M: (2x) 30 x 40 cm, Art.-Nr.: P43774

■ Größe S: 30 x 45 cm, Art.-Nr.: P43771



■ Größe M: 180 x 31 cm, Art.-Nr.: P43800

■ Größe S: 142 x 26 cm, Art.-Nr.: P43799

Lagerungsmöglichkeiten für die Beine im Unterschenkelbereich

Kombination mit Fersenfreilagerung

Alle diese Maßnahmen zur Unterschenkella-
gerung können Sie auch in Verbindung mit
der Fersenfreilagerung (siehe Seite 12)
kombinieren. Sie erhalten dadurch einen
noch besseren Schutz vor bzw. eine Therapi-
eunterstützung bei einem bestehenden
Dekubitus.

Zylinderkissen, Universalkissen, Seitenlagerungskissen bei 30° Seitenlagerung


Bei jedem verwendeten Kissen sind die
Innenseiten der Knie und die Knöchel der
Sprunggelenke wirksam vor Druckstellen
geschützt. Aneinanderreiben ist nicht
möglich.



Zylinderkissen



Universalkissen

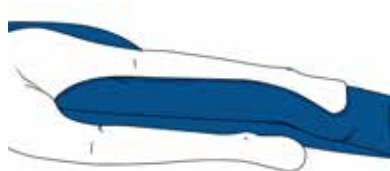

Seitenlagerungskissen

Die Gelenkfortsätze sind geschützt, ohne
dass es zu unangenehmen Zugkräften im
Hüftgelenk kommt.



■ Größe M: 17 x 70 cm, Art.-Nr.: P43779

■ Größe M: (2x) 17 x 31 cm, Art.-Nr.: P43780

■ Größe S: 14 x 45 cm, Art.-Nr.: P43778



■ Größe M: 60 x 40 cm, Art.-Nr.: P43772

■ Größe L: 70 x 50 cm, Art.-Nr.: P43773

■ Größe M: (2x) 30 x 40 cm, Art.-Nr.: P43774

■ Größe S: 30 x 45 cm, Art.-Nr.: P43771



■ Größe M: 180 x 31 cm, Art.-Nr.: P43800

■ Größe S: 142 x 26 cm, Art.-Nr.: P43799

Lagerungsmöglichkeiten im Fußbereich/Fersenfreilagierung

Semi-Fowler-Kissen

Der Unterschenkel wird perfekt geführt und die Ferse liegt frei, so dass Druckbelastung vermieden wird.



■ Größe M: 65 x 50 x 15 cm, Art.-Nr.: P43798

■ Größe S: 50 x 35 x 13 cm, Art.-Nr.: P43797

Fersenentlastungsgurt



Die Fersenentlastung wird mit einem Gurt an der Matratze befestigt und ist damit gegen Verrutschen gesichert. Die Ferse selbst ist auf diese Art wirksam entlastet.



■ Größe M: 90 x 16 cm, Art.-Nr.: P43792

Fersenfreilagierung oder zur Prophylaxe

Als Ergänzung zur Wundtherapie/Prophylaxe. Atmungsaktives Obermaterial (einfach zu reinigen/desinfizieren). Wundsekrete setzen sich nicht fest. Kein Nährboden für Bakterien.

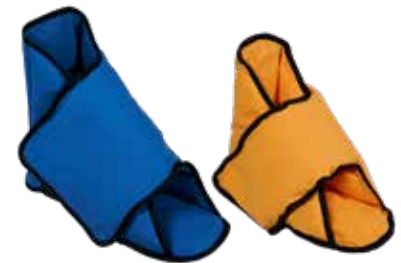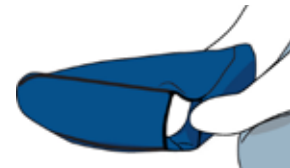

■ Größe M: ab Schuhgröße 38, Art.-Nr.: P43784

■ Größe S: bis Schuhgröße 37, Art.-Nr.: P43783

Lagerungsmöglichkeiten im Fußbereich

Zylinderkissen

Wird das Zylinderkissen nahe der Achillessehne positioniert, ist diese wirksam entlastet. Zusätzlich kann ein Halbmondkissen das Kniegelenk entlasten.



- Größe M: 17 x 70 cm, Art.-Nr.: P43779
- Größe M: (2x) 17 x 31 cm, Art.-Nr.: P43780
- Größe S: 14 x 45 cm, Art.-Nr.: P43778

Spitzfußprophylaxe

Verhindert wirksam eine Überstreckung und Versteifung im Fußgelenk.



Universalkissen und Fersenentlastungsgurt



Fersenentlastungsgurt zur Spitzfußprophylaxe



Deltakissen zur Spitzfußprophylaxe

Kombinationen mit verschiedenen Lagerungskissen bieten hervorragende Möglichkeiten.



- Größe M: 60 x 40 cm, Art.-Nr.: P43772
- Größe L: 70 x 50 cm, Art.-Nr.: P43773
- Größe M: (2x) 30 x 40 cm, Art.-Nr.: P43774
- Größe S: 30 x 45 cm, Art.-Nr.: P43771



- Größe M: 90 x 16 cm, Art.-Nr.: P43792



- Größe M: 41 x 60 cm, Art.-Nr.: P43794
- Größe S: 25 x 42 cm, Art.-Nr.: P43793

Ganzkörperlagerung in Rückenlage

Halbmondkissen mit Semi-Fowler-Kissen

Halbmondkissen mit Semi-Fowler-Kissen zur Unterschenkel Lagerung, Fersenentlastung und Abduktion.




- Größe M: 180 x 31 cm, Art.-Nr.: P43796
- Größe S: 142 x 25 cm, Art.-Nr.: P43795



- Größe M: 65 x 50 x 15 cm, Art.-Nr.: P43798
- Größe S: 50 x 35 x 13 cm, Art.-Nr.: P43797

Halbmondkissen mit Zylinderkissen und zusätzlichem Deltakissen

Halbmondkissen, Zylinderkissen und Deltakissen in unterschiedlichen Kombinationen.

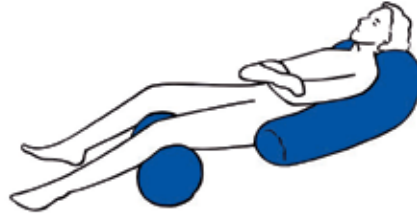

Halbmondkissen mit Zylinderkissen als Knierolle



Alternativ Deltakissen in der Kniebeuge und Zylinderkissen zur Fersenfreilagerung



- Größe M: 17 x 70 cm, Art.-Nr.: P43779
- Größe M: (2x) 17 x 31 cm, Art.-Nr.: P43780
- Größe S: 14 x 45 cm, Art.-Nr.: P43778



- Größe M: 180 x 31 cm, Art.-Nr.: P43796
- Größe S: 142 x 25 cm, Art.-Nr.: P43795



- Größe M: 41 x 60 cm, Art.-Nr.: P43794
- Größe S: 25 x 42 cm, Art.-Nr.: P43793

Ganzkörperlagerung in 30° Seitenlage

Universalkissen, Deltakissen, kleine Universalkissen, Halbmondkissen, Zylinderkissen, Seitenlagerungskissen

Kombinationen zur Ganzkörper-Seitenlagerung mit mehreren Kissen



Universalkissen im Kopfbereich, Deltakissen zur Rückenlagerung, kleines Universalkissen für den Arm, Halbmondkissen für die Beine



- Größe M: 60 x 40 cm, Art.-Nr.: P43772
- Größe L: 70 x 50 cm, Art.-Nr.: P43773
- Größe M: (2x) 30 x 40 cm, Art.-Nr.: P43774
- Größe S: 30 x 45 cm, Art.-Nr.: P43771



- Größe M: 17 x 70 cm, Art.-Nr.: P43779
- Größe M: (2x) 17 x 31 cm, Art.-Nr.: P43780
- Größe S: 14 x 45 cm, Art.-Nr.: P43778



Universalkissen im Kopfbereich, Deltakissen für die Rückenlagerung, Zylinderkissen für Knie sowie Knöchel



- Größe M: 41 x 60 cm, Art.-Nr.: P43794
- Größe S: 25 x 42 cm, Art.-Nr.: P43793



- Größe M: 180 x 31 cm, Art.-Nr.: P43796
- Größe S: 142 x 25 cm, Art.-Nr.: P43795



Universalkissen im Kopfbereich, Seitenlagerungskissen zur Rückenlagerung sowie für Knie und Knöchel




- Größe M: 180 x 31 cm, Art.-Nr.: P43800
- Größe S: 142 x 26 cm, Art.-Nr.: P43799

Ganzkörperlagerung in 135° Seitenlage

Universalkissen, Deltakissen, Zylinderkissen

Kombinationen zur Ganzkörper-Seitenlage-
rung mit mehreren Kissen

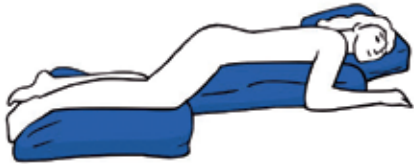

Universalkissen im Kopfbereich, Zylinderkissen
für den Thorax, Universalkissen für den Unter-
schenkel



- Größe M: 60 x 40 cm, Art.-Nr.: P43772
- Größe L: 70 x 50 cm, Art.-Nr.: P43773
- Größe M: (2x) 30 x 40 cm, Art.-Nr.: P43774
- Größe S: 30 x 45 cm, Art.-Nr.: P43771



Universalkissen im Kopfbereich, Universalkissen für
den Thorax und Arm, Zylinderkissen für das
Bein



- Größe M: 41 x 60 cm, Art.-Nr.: P43794
- Größe S: 25 x 42 cm, Art.-Nr.: P43793



Universalkissen im Kopfbereich, Deltakissen für
den Thorax, Universalkissen für den Unter-
schenkel



- Größe M: 17 x 70 cm, Art.-Nr.: P43779
- Größe M: (2x) 17 x 31 cm, Art.-Nr.: P43780
- Größe S: 14 x 45 cm, Art.-Nr.: P43778

Produktübersicht

Universalkissen M und S

HMV-Nr.: 11.11.05.0011



- Größe M: 60 x 40 cm, Art.-Nr.: P43772
- Größe L: 70 x 50 cm, Art.-Nr.: P43773
- Größe M: (2x) 30 x 40 cm, Art.-Nr.: P43774
- Größe S: 30 x 45 cm, Art.-Nr.: P43771

Halbmondkissen M und S

HMV-Nr.: 11.11.05.1014



- Größe M: 180 x 31 cm, Art.-Nr.: P43796
- Größe S: 142 x 25 cm, Art.-Nr.: P43795

Seitenlagerungskissen M und S

HMV-Nr.: 11.11.05.2002



- Größe M: 180 x 31 cm, Art.-Nr.: P43800
- Größe S: 142 x 26 cm, Art.-Nr.: P43799

Deltakissen M und S

HMV-Nr.: 11.11.05.1013



- Größe XL: 60 x 41 cm, Best.-Nr.: NEG 0607
- Größe XS: 42 x 25 cm, Best.-Nr.: NEG 0887

Semi-Fowler-Kissen M und S

HMV-Nr.: 11.11.05.1015



- Größe M: 65 x 50 x 15 cm, Art.-Nr.: P43798
- Größe S: 50 x 35 x 13 cm, Art.-Nr.: P43797

Ringkissen M und S

HMV-Nr.: 11.11.05.0013



- Größe M: 130 x 21 cm, Art.-Nr.: P43777
- Größe S: 106 x 15 cm, Art.-Nr.: P43776

Produktübersicht

Abduktionskissen M und S

HMV-Nr.: 11.11.05.0015




■ Größe M: 30 x 21 x 15 cm, Art.-Nr.: P43807

■ Größe S: 23 x 18 x 12 cm, Art.-Nr.: P43806

Fersenfreilagerung M und S

HMV-Nr.: 11.11.05.0016

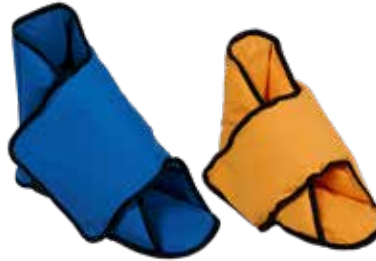

■ Größe M: ab Schuhgröße 38, Art.-Nr.: P43784

■ Größe S: bis Schuhgröße 37, Art.-Nr.: P43783

Hemi-Armkissen M und S

HMV-Nr.: 11.11.05.0017



■ Größe M: 58 x 36, 48 x 16 ø cm Art.-Nr.: P43786

■ Größe S: 45 x 30, 30 x 13 ø cm Art.-Nr.: P43785

Zylinderkissen M und S

HMV-Nr.: 11.11.05.0014



■ Größe M: 17 x 70 cm, Art.-Nr.: P43779

■ Größe M: (2x) 17 x 31 cm, Art.-Nr.: P43780

■ Größe S: 14 x 45 cm, Art.-Nr.: P43778

Fersenfreilagerungsgurt M

HMV-Nr.: 11.11.05.0012



■ Größe M: 90 x 16 cm, Art.-Nr.: P43792

Pflegehinweise für die Kissen

- Das Obermaterial der Kissen ist atmungsaktiv, wasserdicht, abwaschbar sowie wischdesinfektionsfest.
- Die Füllung der Kissen besteht aus Polystyrol-Mikroperlen.
- Die Fersenfreilagerung und der Fersenfreilagerungsgurt sind mit einer Hohlfaser gefüllt, um die Verschiebung des Füllstoffes wirksam zu verhindern.
- Aufgrund der Materialeigenschaften können keine Körperflüssigkeiten (z.B. bei Speichelfluss oder Inkontinenz) in das Gewebe eindringen, so dass eine aufwändige Aufarbeitung entfällt.
- Das Kissen wird abgewaschen und desinfiziert und kann somit sofort wiederverwendet werden.
- Zur Reinigung der Lagerungskissen bitten wir Sie, stets chlorfreie Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu benutzen.
- Die Lagerungskissen sind mit Ausnahme der Fersenfreilagerung nicht waschbar.

Textilbezüge

- Dauerhaft schwer entflammbar
- Grundkomponente ist eine Cellulosefaser, die aus dem natürlich nachwachsenden Rohstoff Holz gewonnen wird.
- Waschbar bis 60 °C

Musterrezept als Beispiel

*1. Artikelbeschreibung Hersteller
*2. Hilfsmittelnr.
*3. ggf. Baumwollbezug erforderlich
*4. Diagnose

Artikel	Größe	Maße in cm L x B (x H)	Bestellnr.
Textilbezug für Universalkissen	M	60 x 40	B43817
	M (2 Stück)	40 x 30	B43835
	S	45 x 30	B43818
Textilbezug für Deltakissen	M	60 x 41	B43819
	S	42 x 25	B43820
Textilbezug für Seitenlagerungskissen	M	180 x 31	B43823
	S	142 x 26	B43824
Textilbezug für Ringkissen	M	130 x 21	B43827
	S	106 x 15	B43828
Textilbezug für Zylinderkissen	M	70 x 18	B43829
	S	45 x 14	B43830
Textilbezug für Hemi-Armkissen	M	58 x 36 + 48 x 16ø	B43833
	S	45 x 30 + 30 x 13ø	B43834
Textilbezug für Halbmondkissen	M	180 x 31	B43821
	S	142 x 25	B43822
Textilbezug für Abduktionskissen	M	30 x 21 x 15	B43831
	S	23 x 18 x 12	B43832
Textilbezug für Semi-Fowler-Kissen	M	65 x 50 x 15	B43825
	S	50 x 35 x 13	B43826



Luttermann GmbH
HomeCare

Hindenburgstraße 51-55
45127 Essen

Tel.: (0201) 8 20 50-888

Fax: (0201) 8 20 50-988

homecare@luttermann.de

www.luttermann.de

Alle Angaben ohne Gewähr.