

Lagerungskissen

Für die individuelle
Positionierung
pflegebedürftiger
Menschen

Beispiele und Produkte

Lagerungsmöglichkeiten für pflegebedürftige Menschen

Inhalt

Inhalt/Vorwort	Seite	2
Kopf	Seite	3-4
Oberkörper	Seite	5-6
Arme	Seite	6-7
Oberschenkel	Seite	8
Knie	Seite	9
Unterschenkel	Seite	10-11
Fuß	Seite	12-13
Rückenlage	Seite	14
Seitenlage 30°	Seite	15
Seitenlage 135°	Seite	16
Produktübersicht	Seite	17-18
Bezüge/Pflege	Seite	19

Als pflegender Angehöriger, bzw. Pflegekraft steht man im Alltag immer wieder vor der Herausforderung: Wie erreiche ich die bestmögliche Versorgung für den Pflegebedürftigen?

Die Lagerung nimmt hier eine zentrale Rolle ein. Neben dem Wohlbefinden für den Patienten dient die Lagerung sowohl der Vorbeugung von Folgeerkrankungen, als auch der Unterstützung therapeutischer Maßnahmen.

Mit einer durchdachten Lagerung können Komplikationen wie die Entstehung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) vermieden werden. Gelenkversteifungen (Kontrakturen, Spitzfuß) und Spastiken können reduziert werden.

Darüber hinaus fördert eine individuell angepasste Lagerung aber auch die Eigenbewegung, unterstützt die Körperwahrnehmung (z.B. bei Schlaganfallpatienten) und erleichtert die Atmung.

Die Lagerungsintervalle sollten, individuell auf den Betroffenen abgestimmt, zwischen zwei und vier Stunden erfolgen.

Trotz Einsatz einer Antidekubitusmatratze bleibt die regelmäßige Lagerung ein wichtiger pflegerischer Bestandteil zur Vermeidung eines Dekubitus.

Diese Broschüre für spezielle Lagerungshilfsmittel soll Ihnen helfen, sich einen Überblick über die Möglichkeiten der individuellen Lagerungsmöglichkeiten zu machen und Sie bei der Auswahl des richtigen Hilfsmittels unterstützen.

Die hier aufgeführten Produkte haben alle eine Hilfsmittelnummer und sind somit bei vorliegender Indikation verordnungsfähig.

Lagerungsmöglichkeiten für den Kopf

Ringkissen

Der Kopf ist zu jeder Zeit sicher positioniert. Die Pflegeperson hat somit beide Hände frei zur Bewegungsförderung des Betroffenen.



Rückenlagerung



30° Seitenlagerung



135° Seitenlagerung



■ Größe XL: 130 x 21 cm, Best.-Nr.: NEG 0612

■ Größe XS: 106 x 15 cm, Best.-Nr.: NEG 0880

Zylinderkissen

Das Zylinderkissen stabilisiert in Seitenlagerung die physiologische Stellung der Wirbelsäule.



■ Größe XL: 17 x 70 cm, Best.-Nr.: NEG 0613

■ Größe XL: (2x) 17 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0614

■ Größe XS: 14 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0884

Universalkissen

Das Universalkissen stabilisiert die Lagerung des Kopfes und verhindert z.B. die Überstreckung.



■ Größe XL: 60 x 40 cm, Best.-Nr.: NEG 0605

■ Größe XL: 70 x 50 cm, Best.-Nr.: NEG 0750

■ Größe XL: (2x) 30 x 40 cm, Best.-Nr.: NEG 0606

■ Größe XS: 30 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0881

Lagerungsmöglichkeiten für den Kopf

Semi-Fowlerkissen

Dieses Kissen verhindert wirksam die Überstreckung des Kopfes und verbessert die Eigenwahrnehmung des zu Pflegenden.



■ Größe XL: 65 x 50 x 15 cm, Best.-Nr.: NEG 0611

■ Größe XS: 50 x 35 x 13 cm, Best.-Nr.: NEG 0886

Halbmondkissen

Das Halbmondkissen unterstützt in Seitlage die Positionierung des Kopfes und stabilisiert den Rücken. In Rückenlage werden zusätzl. Schulter und Nacken entlastet.



30° Seitenlagerung



Rückenlagerung



■ Größe: 180 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0608

■ Größe: 142 x 25 cm, Best.-Nr.: NEG 0882

Lagerungsmöglichkeiten für den Oberkörper

Halbmondkissen

Das Halbmondkissen dient zur Nestlagerung. Die Eigenwahrnehmung wird verbessert. Schultern und Kopf werden mit nur einem Element positioniert.



Rückenlagerung



30° Seitenlagerung

Eine Entlagerung des zu Pflegenden wird wirksam verhindert.



■ Größe: 180 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0608

■ Größe: 142 x 25 cm, Best.-Nr.: NEG 0882

Zylinderkissen

Das Zylinderkissen wird zur Abstützung des Oberkörpers bei kleineren Personen empfohlen.




■ Größe XL: 17 x 70 cm, Best.-Nr.: NEG 0613

■ Größe XL: (2x) 17 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0614

■ Größe XS: 14 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0884

Universalkissen

Mit dem Universalkissen kann in Seitenlage Schulter und Arm in physiologischer Position gelagert werden. Es unterstützt die Körperwahrnehmung.

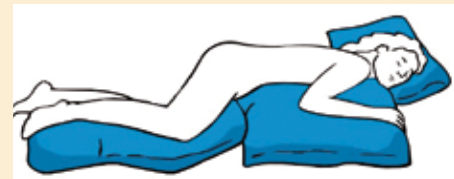

135° Seitenlagerung



■ Größe XL: 60 x 40 cm, Best.-Nr.: NEG 0605

■ Größe XL: 70 x 50 cm, Best.-Nr.: NEG 0750

■ Größe XL: (2x) 30 x 40 cm, Best.-Nr.: NEG 0606

■ Größe XS: 30 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0881


Lagerungsmöglichkeiten für den Oberkörper und die Arme

Deltakissen

Dieses Kissen stützt den Oberkörper und kann sowohl in Seitenlagerung als auch in 135°-Lagerung eingesetzt werden und verhindert das Entlagern.



135° Seitenlagerung

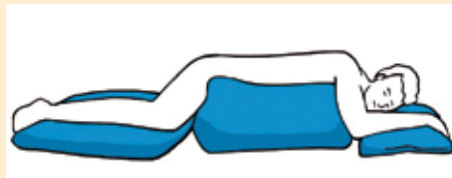

90° Seitenlagerung mit zusätzlicher Abstützung durch Universalkissen zur Positionierung des Unterarms.




■ Größe XL: 40 x 60 cm, Best.-Nr.: NEG 0607

■ Größe XS: 25 x 42 cm, Best.-Nr.: NEG 0887

Seitenlagerungskissen

Dieses Kissen ermöglicht die 30°- und 135°-Seitenlagerung über die gesamte Körperlänge mit nur einem Hilfsmittel und erhöht die Körperwahrnehmung.

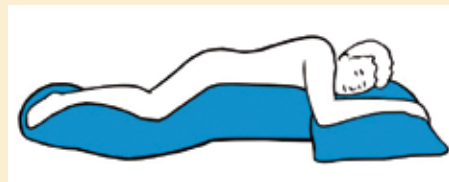

135° Seitenlagerung



30° Seitenlagerung



■ Größe: 180 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0610

■ Größe: 140 x 26 cm, Best.-Nr.: NEG 0883

Hemi-Arm-Kissen

Dieses Kissen bietet eine Variante zur individuellen Positionierung des Armes, die therapeutisch ersetzen kann und das Dekubitusrisiko an den Ellenbogen verringert.



■ Größe: 58 x 36, 48 x 35 Ø cm Best.-Nr.: NEG 0732

■ Größe: 45 x 30, 30 x 13 Ø cm Best.-Nr.: NEG 0889

Lagerungsmöglichkeiten für die Arme

Abduktionskissen

Bei einem gelähmten Arm ist in der Positionierung auch die natürliche Beugung zu berücksichtigen.

Außerdem unterstützt das Abduktionskissen die Oedemrückbildung und vermeidet Gelenkversteifungen von Hand und Unterarm.



ca. 30° Beugung



■ Größe: 15 x 30 x 20 cm, Best.-Nr.: NEG 0615

■ Größe: 12 x 23 x 18 cm, Best.-Nr.: NEG 0888

Zylinderkissen XS, Universalkissen XS

Beide Kissen können sehr gut bei der klassischen Handlagerung eingesetzt werden.



Zylinderkissen XS



Universalkissen XS




■ Größe XS: 14 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0884



■ Größe XS: 30 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0881

Universalkissen

Das Universalkissen kann bei Seitenlagerung auch in Verbindung mit dem Zylinderkissen für die Beine genutzt werden.

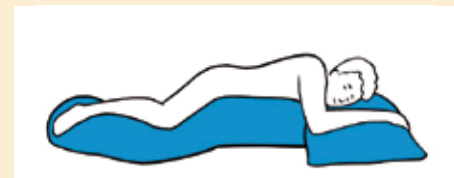

130° Seitenlagerung großem Universalkissen



30° Lagerung mit kleinem Universalkissen



■ Größe XL: 60 x 40 cm, Best.-Nr.: NEG 0605

■ Größe XL: 70 x 50 cm, Best.-Nr.: NEG 0750

■ Größe XL: (2x) 30 x 40 cm, Best.-Nr.: NEG 0606


■ Größe XS: 30 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0881

Lagerungsmöglichkeiten für die Beine im Oberschenkelbereich

Abduktionskissen

Bei einigen Positionierungen ist eine Abduktion im Kniebereich notwendig.

Bei Betroffenen mit Spastiken ist dies eine wirksame Maßnahme.

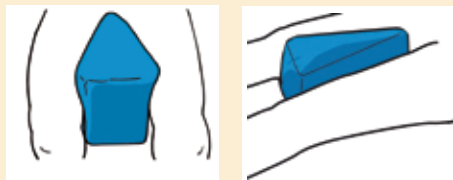


■ Größe: 15 x 30 x 20 cm, Best.-Nr.: NEG 0615

■ Größe: 12 x 23 x 18 cm, Best.-Nr.: NEG 0888

Semi-Fowlerkissen

Seine einzigartige Form mit eingearbeitetem Abduktionselement sichert eine hüftbreite Positionierung der Beine. Die Unterschenkel sind optimal geführt. Die Fersen liegen frei.

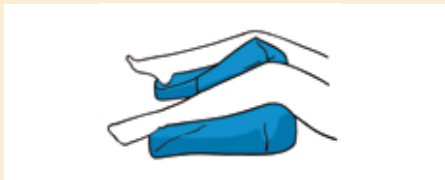

■ Größe XL: 65 x 50 x 15 cm, Best.-Nr.: NEG 0611

■ Größe XS: 50 x 35 x 13 cm, Best.-Nr.: NEG 0886

Kombinationen

Sie sehen hier eine Kombination aus Universal- und Abduktionskissen.



Universalkissen unter den Waden



Im Vergleich: Das Semi-Fowler Kissen

Lagerungsmöglichkeiten für die Beine im Kniebereich

Deltakissen

Durch die Dreiecksform besonders geeignet bei Kinie- und Hüftbeugekontrakturen. Ein Universalkissen kann bei sehr großen Personen zusätzlich untergelegt werden.




■ Größe XL: 40 x 60 cm, Best.-Nr.: NEG 0607

■ Größe XS: 25 x 42 cm, Best.-Nr.: NEG 0887

Semi-Fowlerkissen

Das Kissen sorgt für eine hüftbreite Positionierung des Betroffenen. Der Abduktionskeil stellt sicher, dass sich an den Gelenkfortsätzen des Knies keine Druckstellen bilden.

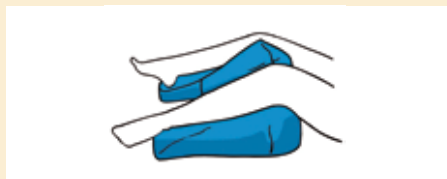


■ Größe XL: 65 x 50 x 15 cm, Best.-Nr.: NEG 0611

■ Größe XS: 50 x 35 x 13 cm, Best.-Nr.: NEG 0886

Zylinderkissen

Das Zylinderkissen kann zur entlastenden Lagerung der Knie genutzt werden.

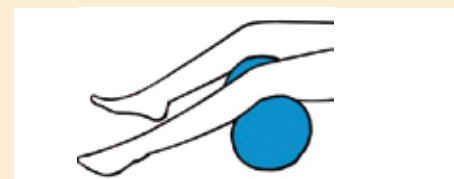

■ Größe XL: 17 x 70 cm, Best.-Nr.: NEG 0613

■ Größe XL: (2x) 17 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0614

■ Größe XS: 14 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0884

Lagerungsmöglichkeiten für die Beine im Unterschenkelbereich

Zylinderkissen Größe XS und Deltakissen

Durch die Kombination eines Deltakissens mit einem Zylinderkissen Größe XS wird die Positionierung der Waden bei gleichzeitiger Druckentlastung der Fersen ermöglicht.



In Rückenlage



■ Größe XS: 14 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0884



■ Größe XL: 40 x 60 cm, Best.-Nr.: NEG 0607


■ Größe XS: 25 x 42 cm, Best.-Nr.: NEG 0887

Zylinderkissen, Universalkissen, Seitenlagerungskissen bei 135° Seitenlagerung


Bei der Positionierung wird das oben liegende Bein auf einem Zylinder- oder Universalkissen bzw. Seitenlagerungskissen positioniert.



Zylinderkissen

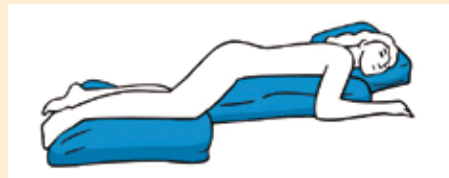

Universalkissen

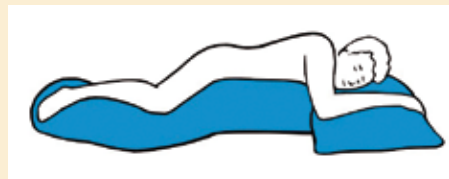

Seitenlagerungskissen

Die Gelenkfortsätze sind geschützt, ohne dass es zu unangenehmen Zugkräften im Hüftgelenk kommt



■ Größe XL: 17 x 70 cm, Best.-Nr.: NEG 0613

■ Größe XL: (2x) 17 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0614

■ Größe XS: 14 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0884



■ Größe XL: 60 x 40 cm, Best.-Nr.: NEG 0605

■ Größe XL: 70 x 50 cm, Best.-Nr.: NEG 0750

■ Größe XL: (2x) 30 x 40 cm, Best.-Nr.: NEG 0606

■ Größe XS: 30 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0881



■ Größe: 180 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0610

■ Größe: 140 x 26 cm, Best.-Nr.: NEG 0883

Lagerungsmöglichkeiten für die Beine im Unterschenkelbereich

Kombination mit Fersenfreilagerung

Alle diese Maßnahmen zur Unterschenkellaagerung können Sie auch in Verbindung mit der Fersenfreilagerung (siehe Seite 12) kombinieren. Sie erhalten dadurch einen noch besseren Schutz vor bzw. eine Therapieunterstützung bei einem bestehenden Dekubitus.

Zylinderkissen, Universalkissen, Seitenlagerungskissen bei 30° Seitenlagerung

Bei jedem verwendeten Kissen sind die Innenseiten der Knie und die Knöchel der Sprunggelenke wirksam vor Druckstellen geschützt. Aneinander reiben nicht möglich.



Zylinderkissen



Universalkissen



Seitenlagerungskissen

Die Gelenkfortsätze sind geschützt, ohne dass es zu unangenehmen Zugkräften im Hüftgelenk kommt.



■ Größe XL: 17 x 70 cm, Best.-Nr.: NEG 0613

■ Größe XL: (2x) 17 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0614

■ Größe XS: 14 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0884



■ Größe XL: 60 x 40 cm, Best.-Nr.: NEG 0605

■ Größe XL: 70 x 50 cm, Best.-Nr.: NEG 0750

■ Größe XL: (2x) 30 x 40 cm, Best.-Nr.: NEG 0606

■ Größe XS: 30 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0881




■ Größe: 180 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0610

■ Größe: 140 x 26 cm, Best.-Nr.: NEG 0883

Lagerungsmöglichkeiten im Fußbereich/Fersenfreilagerung

Semi-Fowlerkissen

Der Unterschenkel wird perfekt geführt und die Ferse liegt frei, so dass Druckbelastung vermieden wird.

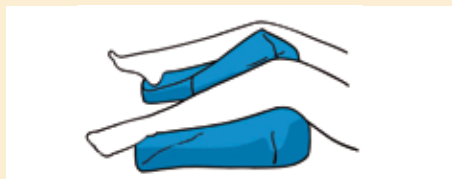

■ Größe XL: 65 x 50 x 15 cm, Best.-Nr.: NEG 0611

■ Größe XS: 50 x 35 x 13 cm, Best.-Nr.: NEG 0886

Fersenentlastungsgurt

Die Fersenentlastung wird mit einem Gurt an der Matratze befestigt und ist damit gegen Verrutschen gesichert. Die Ferse selbst ist auf diese Art wirksam entlastet.



■ Größe: 90 x 15 cm, Best.-Nr.: NEG 0609

Fersenfreilagerung oder zur Prophylaxe

Als Ergänzung zur Wundtherapie/Prophylaxe. Atmungsaktives Obermaterial (einfach zu reinigen/desinfizieren). Wundsekrete setzen sich nicht fest. Kein Nährboden für Bakterien.



■ Größe XL: ab Schuhgröße 39, Best.-Nr.: NEG 0616

■ Größe XS: bis Schuhgröße 38, Best.-Nr.: NEG 0885

Lagerungsmöglichkeiten im Fußbereich

Zylinderkissen

Wird das Zylinderkissen nahe der Achillessehne positioniert, ist diese wirksam entlastet. Zusätzlich kann ein Halbmondkissen das Kniegelenk entlasten.



- Größe XL: 17 x 70 cm, Best.-Nr.: NEG 0613
- Größe XL: (2x) 17 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0614
- Größe XS: 14 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0884

Spitzfußprophylaxe

Verhindert wirksam eine Überstreckung und Versteifung im Fußgelenk.



Universalkissen und Fersenentlastungsgurt



Fersenentlastungsgurt zur Spitzfußprophylaxe



Deltakissen zur Spitzfußprophylaxe

Kombinationen mit verschiedenen Lagerungskissen bieten hervorragende Möglichkeiten.



- Größe XL: 60 x 40 cm, Best.-Nr.: NEG 0605
- Größe XL: 70 x 50 cm, Best.-Nr.: NEG 0750
- Größe XL: (2x) 30 x 40 cm, Best.-Nr.: NEG 0606
- Größe XS: 30 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0881



- Größe: 90 x 15 cm, Best.-Nr.: NEG 0609



- Größe XL: 40 x 60 cm, Best.-Nr.: NEG 0607
- Größe XS: 25 x 42 cm, Best.-Nr.: NEG 0887

Ganzkörperlagerung in Rückenlage

Halbmondkissen mit Semi-Fowlerkissen

Halbmondkissen mit Semi-Fowler-Kissen zur Unterschenkellagerung, Fersenentlastung und Abduktion.



■ Größe: 180 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0608

■ Größe: 142 x 25 cm, Best.-Nr.: NEG 0882




■ Größe XL: 65 x 50 x 15 cm, Best.-Nr.: NEG 0611

■ Größe XS: 50 x 35 x 13 cm, Best.-Nr.: NEG 0886

Halbmondkissen mit Zylinderkissen und zusätzlichem Deltakissen

Halbmondkissen, Zylinderkissen und Deltakissen in unterschiedlichen Kombinationen.

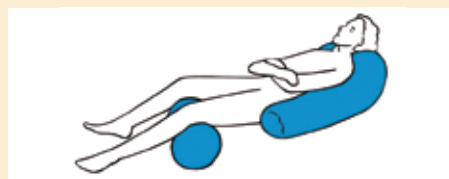

Halbmondkissen mit Zylinderkissen als Knierolle



Alternativ Deltakissen in der Kniebeuge und Zylinderkissen zur Fersenfreilagerung



■ Größe XL: 17 x 70 cm, Best.-Nr.: NEG 0613

■ Größe XL: (2x) 17 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0614

■ Größe XS: 14 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0884



■ Größe: 180 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0608

■ Größe: 142 x 25 cm, Best.-Nr.: NEG 0882



■ Größe XL: 40 x 60 cm, Best.-Nr.: NEG 0607

■ Größe XS: 25 x 42 cm, Best.-Nr.: NEG 0887

Ganzkörperlagerung in 30° Seitenlage

Universalkissen, Deltakissen, kleine Universalkissen, Halbmondkissen, Zylinderkissen, Seitenlagerungskissen

Kombinationen zur Ganzkörper-Seitenlage-
rung mit mehreren Kissen



Universalkissen im Kopfbereich, Deltakissen zur Rücken-
lagerung, kleines Universalkissen für den Arm,
Halbmondkissen für die Beine



Universalkissen im Kopfbereich, Deltakissen für die
Rückenlagerung, Zylinderkissen für Knie sowie Knöchel



Universalkissen im Kopfbereich, Seitenlagerungskissen
zur Rückenlagerung sowie für Knie und Knöchel



- Größe XL: 60 x 40 cm, Best.-Nr.: NEG 0605
- Größe XL: 70 x 50 cm, Best.-Nr.: NEG 0750
- Größe XL: (2x) 30 x 40 cm, Best.-Nr.: NEG 0606
- Größe XS: 30 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0881



- Größe XL: 40 x 60 cm, Best.-Nr.: NEG 0607
- Größe XS: 25 x 42 cm, Best.-Nr.: NEG 0887



- Größe XL: 17 x 70 cm, Best.-Nr.: NEG 0613
- Größe XL: (2x) 17 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0614
- Größe XS: 14 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0884



- Größe: 180 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0608
- Größe: 142 x 25 cm, Best.-Nr.: NEG 0882




- Größe: 180 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0610
- Größe: 140 x 26 cm, Best.-Nr.: NEG 0883

Ganzkörperlagerung in 135° Seitenlage

Universalkissen, Deltakissen, Zylinderkissen,


Kombinationen zur Ganzkörper-Seitenlage-
rung mit mehreren Kissen

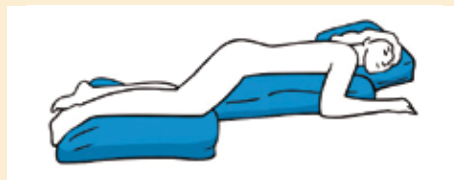

Universalkissen im Kopfbereich, Zylinderkissen für den Thorax, Universalkissen für den Unterschenkel



Universalkissen im Kopfbereich, Universalkissen für den Thorax und Arm, Zylinderkissen für das Bein

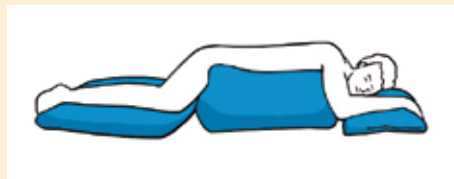

Universalkissen im Kopfbereich, Deltakissen für den Thorax, Universalkissen für den Unterschenkel



- Größe XL: 60 x 40 cm, Best.-Nr.: NEG 0605
- Größe XL: 70 x 50 cm, Best.-Nr.: NEG 0750
- Größe XL: (2x) 30 x 40 cm, Best.-Nr.: NEG 0606
- Größe XS: 30 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0881



- Größe XL: 40 x 60 cm, Best.-Nr.: NEG 0607
- Größe XS: 25 x 42 cm, Best.-Nr.: NEG 0887



- Größe XL: 17 x 70 cm, Best.-Nr.: NEG 0613
- Größe XL: (2x) 17 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0614
- Größe XS: 14 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0884

Produktübersicht

Universalkissen XL und XS

HMV-Nr.: 11.11.05.0011



- Größe XL: 60 x 40 cm, Best.-Nr.: NEG 0605
- Größe XL: 70 x 50 cm, Best.-Nr.: NEG 0750
- Größe XL: (2x) 30 x 40 cm, Best.-Nr.: NEG 0606
- Größe XS: 30 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0881

Halbmondkissen XL und XS

HMV-Nr.: 11.11.05.1014



- Größe: 180 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0608
- Größe: 142 x 25 cm, Best.-Nr.: NEG 0882

Seitenlagerungskissen XL und XS

HMV-Nr.: 11.11.05.2002



- Größe: 180 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0610
- Größe: 140 x 26 cm, Best.-Nr.: NEG 0883

Deltakissen XL und XS

HMV-Nr.: 11.11.05.1013



- Größe XL: 40 x 60 cm, Best.-Nr.: NEG 0607
- Größe XS: 25 x 42 cm, Best.-Nr.: NEG 0887

Semi-Fowler-Kissen XL und XS

HMV-Nr.: 11.11.05.1015



- Größe XL: 65 x 50 x 15 cm, Best.-Nr.: NEG 0611
- Größe XS: 50 x 35 x 13 cm, Best.-Nr.: NEG 0886

Ringkissen XL und XS

HMV-Nr.: 11.11.05.1013



- Größe XL: 130 x 20 cm, Best.-Nr.: NEG 0612
- Größe XS: 106 x 15 cm, Best.-Nr.: NEG 0880

Produktübersicht

Abduktionskissen XL und XS

HMV-Nr.: 11.11.05.0015



■ Größe: 15 x 30 x 20 cm, Best.-Nr.: NEG 0615

■ Größe: 12 x 23 x 18 cm, Best.-Nr.: NEG 0888

Fersenfreilagerung XL und XS

HMV-Nr.: 11.11.05.0016



■ Größe XL: ab Schuhgröße 39, Best.-Nr.: NEG 0616

■ Größe XS: bis Schuhgröße 38, Best.-Nr.: NEG 0885

Hemi-Armkissen XL und XS

HMV-Nr.: 11.11.05.0017



■ Größe: 58 x 36, 48 x 35 Ø cm Best.-Nr.: NEG 0732

■ Größe: 45 x 30, 30 x 13 Ø cm Best.-Nr.: NEG 0889

Zylinderkissen XL und XS

HMV-Nr.: 11.11.05.1014



■ Größe XL: 17 x 70 cm, Best.-Nr.: NEG 0613

■ Größe XL: (2x) 17 x 31 cm, Best.-Nr.: NEG 0614

■ Größe XS: 14 x 45 cm, Best.-Nr.: NEG 0884

Fersenfreilagerungsgurt XL

HMV-Nr.: 11.11.05.0012



■ Größe: 90 x 15 cm, Best.-Nr.: NEG 0609

Bei der Auswahl des Küssens bitte beachten:

Die **grünen Küssens** sind eher für Kinder und kleine/zarte Erwachsene geeignet.

Die **blaue Variante** findet ihren optimalen Einsatz bei Erwachsenen.

Bezüge für Kissen/Tipps zur Pflege

Bezüge für Lagerungskissen

Bezugsart

Größe in cm

Art.-Nr.

Wichtiges zur Pflege

Universalkissen XL	NEG 0605	Baumwolle	40 x 60	NEG 0628
		PU	40 x 60	NEG 0621
Deltakissen XL	NEG 0607	Baumwolle	40 x 60	NEG 0629
		PU	40 x 60	NEG 0622
Halbmondkissen XL	NEG 0608	Baumwolle	180 x 31	NEG 0630
		PU	180 x 31	NEG 0623
Seitenlagerungskissen XL	NEG 0610	Baumwolle	181 x 31	NEG 0631
		PU	181 x 31	NEG0624
Semi-Fowler-Kissen XL	NEG 0611	Baumwolle	65 x 50 x 15	NEG 0632
		PU	65 x 50 x 15	NEG 0625
Ringkissen XL	NEG 0612	Baumwolle	20 x 130	NEG 0633
		PU	20 x 130	NEG 0626
Zylinderkissen XL	NEG 0613	Baumwolle	17 x 70	NEG 0634
		PU	17 x 70	NEG 0627

- Das Obermaterial der Kissen ist atmungsaktiv, wasserdicht, abwaschbar sowie wischdesinfektionsfest.
- Die Füllung der Kissen besteht aus Polystyrol-Mikroperlen.
- Die Fersenfreilagerung und der Fersenfreilagerungsgurt sind mit einer Hohlfaser gefüllt, um die Verschiebung des Füllstoffes wirksam zu verhindern.
- Aufgrund der Materialeigenschaften können keine Körperflüssigkeiten (z.B. bei Speichelfluss oder Inkontinenz) in das Gewebe eindringen, so dass eine aufwändige Aufarbeitung entfällt.
- Das Kissen wird abgewaschen und desinfiziert und kann somit sofort weiterverwendet werden.
- Zur Reinigung der Lagerungskissen bitten wir Sie, stets chlorfreie Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu benutzen
- Die Lagerungskissen sind mit Ausnahme der Fersenfreilagerung nicht waschbar.



Luttermann GmbH

Hindenburgstr. 51-55

45127 Essen

Telefon: (0201) 8 20 50-888

Telefax: (0201) 2 09 22

E-Mail: carecenter@luttermann.de

www.luttermann.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Titelbild: © stokkete - Fotolia.com